

Gebruik

Voor een maximaal resultaat, vóór gebruik de oogleden reinigen met OCuSOFT® Lid Scrub™ PLUS. De tranquileyes vocht pads 30 seconden in warm water dompelen. De thermoeyes gelpacks activeren. Het warmtepack in de bril met bevochtigd schuim plaatsen. De tranquileyes goed vastzetten op uw gezicht en hoofd. Ontspannen en genieten van het zalige gevoel van warme, vochtige, goed gesmeerde ogen. Dragen zolang de bril comfortabel blijft zitten. De aanbevolen frequentie is 30 minuten per dag, of zoals voorgeschreven. Sommige mensen ondervinden meer langdurige verlichting als ze tranquileyes de hele nacht door dragen. Maar u hoeft de bril niet tijdens uw slaap te dragen om er baat bij te hebben. Tranquileyes werkt immers in de tijd. Hoe vaker u de bril gebruikt, hoe beter de resultaten zijn. Na gebruik van tranquileyes, de bril gewoon spoelen met warm water en ophangen om te drogen. Om de thermoeyes warmtepacks opnieuw te gebruiken, 3 tot 5 minuten in kokend water leggen, verwijderen en laten afkoelen. Zodra ze weer op kamertemperatuur zijn, kunnen de gelpacks tot 100 keer opnieuw geactiveerd worden voor warmte- of koudebehandelingen. Tranquileyes en thermoeyes zijn geen vervanging van enige medicatie die uw arts aanbeveelt, maar moeten eerder in combinatie met uw lopende behandelingen tegen droge ogen gebruikt worden. We raden aan om vóór gebruik eerst het advies van uw arts in te winnen.



meer info vindt u op www.dryeyes.be
Tel (+32) (0)3 293 51 16
E-mail: info@opseyewear.be



Tranquileyes oogbevochtigende behandeling

Over droge ogen

Miljoenen mensen kampen met droge ogen. Dit wil zeggen dat ze niet voldoende traanvocht aanmaken om de ogen vochtig te houden. Er zijn tal van oorzaken van het droge-ogensyndroom: veroudering, irritaties in de omgeving, de levensstijl, letsels of andere bestaande medische aandoeningen. Droge ogen behandelen, is niet enkel belangrijk voor uw comfort, maar ook voor de gezondheid van uw ogen. Niet alleen smeert de traanfilm de ogen, hij beschermt ook tegen infecties, voedt en maakt het hoornvlies glad, zodat u scherp blijft zien.

Gebruikelijke oorzaken van droge ogen:

- Blootstelling aan zon en wind
- Koude of droge lucht
- Verwarming en klimaatregeling binnenshuis
- Lang voor het computerscherm zitten
- Hoge hoogtes
- Oogchirurgie
- Hormonale schommelingen

Ook heel wat medicatie kan droge ogen veroorzaken, zoals:

- Antihistamines en ontzwellingsmiddelen
- Bloeddrukmedicatie
- Medicatie tegen depressie en angst

Daarnaast tasten veel bestaande aandoeningen of ziektes de aanmaak van vocht aan, zoals:

- Schilddierstoornissen
- Syndroom van Sjögren
- Reumatoïde artritis
- Auto-immuunstoornissen
- Verlamming van Bell
- Diabetes



De aandoeningen kunnen gaan van mild, matig tot extreem, maar de symptomen zijn meestal:

- Roodheid
- Branderigheid
- Jeuk
- Prikkerig gevoel
- Overmatig tranen
- Lichtgevoeligheid
- Slijmafscheiding

Sommige mensen vertonen alle bovenstaande symptomen samen, maar de meeste hebben er slechts enkele. Als u één van deze symptomen hebt, vraag uw arts informatie over droge ogen. Zodra een diagnose gesteld is, zal uw arts u advies geven over de gepaste behandeling. Momenteel kunnen droge ogen niet genezen worden, maar er zijn een hele reeks behandelingen om de symptomen efficiënt aan te pakken.

Naargelang van uw aandoening, kan uw arts één of meer volgende behandelingen voorschrijven:

- Kunsttranen
- Voedingssupplementen met lijnzaadolie/ visolie (omega-3 vetzuren, 1000-3000 mg/dag)
- Oogdruppels
- Tranquileyes met thermoeyes
- Tijdelijke of blijvende afsluiting van de traankanalen (toebranden van de traanpunten)
- Een behandeling met doxycycline in lage doses



Droge ogen verlichten met tranquileyes en thermoeyes

Vochtige-warmtebehandeling, of warmtecompressen, om droge ogen te verzachten.

De tranquileyes bril met zachte, soepele schuimkussentjes dekt de ogen comfortabel af tegen tocht, en zorgt voor volledige duisternis. De combinatie van warmte, die met de herbruikbare gelpacks opgewekt wordt (thermoeyes) en het water levert compressen op die 20 tot 25 minuten warm blijven. De aanhoudende warmte stimuleert en maakt kritische oliën vrij in de klieren van Meibom, die vereist zijn om de verdamping van natuurlijke tranen tegen te gaan. Het warme vocht zorgt ook voor een zeer vochtige omgeving die de verdamping van natuurlijke en kunstmatige tranen verder afremt, terwijl tegelijk de tere huid rond de ogen wordt bevochtigd.



Klik op het schijfje binnenin



Plaats in de oogbril met het vochtpad

Tranquileyes kan ook gebruikt worden voor koudebehandelingen om de symptomen van oogallergieën en gezwollen oogleden te beperken. Het resultaat is heldere, comfortabele ogen die u kan zien en voelen.

Geniet van tranquileyes wanneer uw ogen gesloten zijn: wanneer u rust, slaapt of tijdens een vliegreis.

